




SAM Pelvic Sling™ II

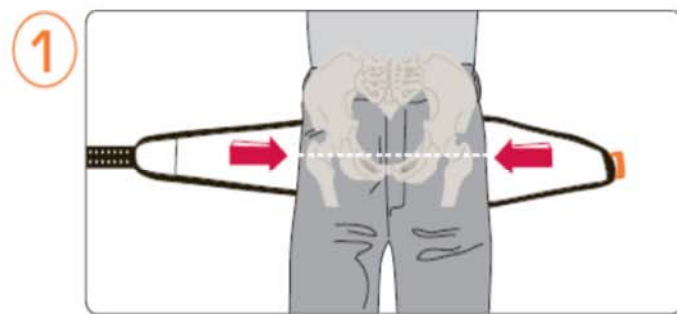

- Töm patientens fickor och avlägsna sådant som kan ge tryckskador.
- Placera Sam Sling under patienten enligt bild.

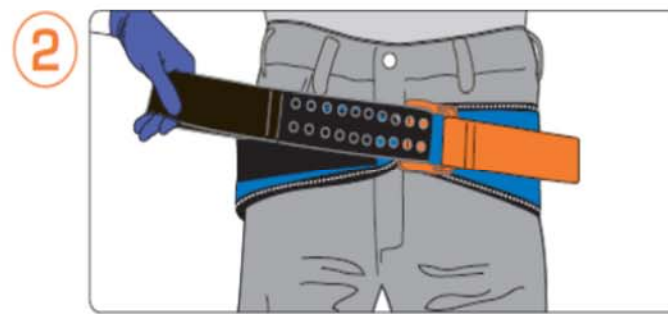

- Ta den svarta remmen genom spännet.
- Dra igenom hela bältet enligt bild.

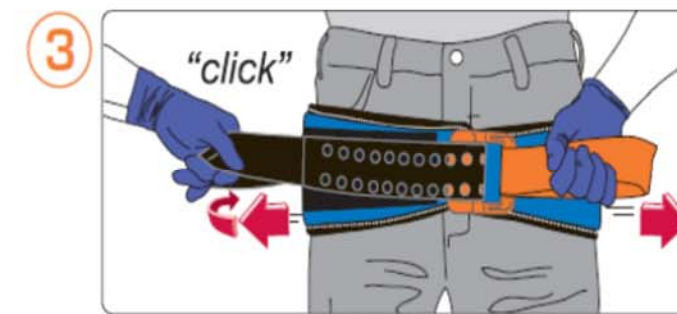

- Håll i den **ORANGA** öglan och dra i den **SVARTA** öglan tills du hör ett klick.
- Bibehåll draget och fixera den svarta remmen mot Sam Sling (Ytterligare ett klick kan höras).



P +46 (0)520 420200
F +46 (0)520 420209
E fab@fernonorden.com

Kardanvägen 37
46138 Trollhättan, Sweden

Company reg.no: 556231-7767

Ferno Norden AB
www.fernonorden.se