



## Dr. Marx Amputert pose M For sikker lagring og transport av traumatisk amputerte kroppsdeler

Størrelse 2 arm henhold til DIN EN 1789

### Innvendig

En steril dobbeltvegget pose (110 x 40 cm), for bruk som beholder for en amputert hånd (f.eks.)

### Instruksjoner for bruk

1. Pakk den amputerte kroppsdelene i en steril bandasje.
2. Åpne esken, og brett ut den dobbeltveggede posen. Den indre og ytre posen er sammenkoblet i bunnen.
3. Plasser den amputerte kroppsdelene i den indre posen, og trekk deretter de to røde trådene for å lukke ordentlig.
4. Fyll den ytre posen til et nivå over den amputerte delen med like deler vann og is. Trekk deretter de to grønne snorene for å lukke den ordentlig. Som et alternativ kan kalde kompresser også brukes til kjøling.
5. Støtt godt opp posen (fra både indre og ytre pose). Hvis posen er veldig full og tung, gi ekstra støtte til sidene og basen.
6. For langdistansetransporter, sørg for å fylle på ny is eller kalde kompresser.

REF 2204 57

LOT / see label



CE 0481



STERILE R

MD

Medizinprodukt

MADE  
IN  
GERMANY

