

Kuvaus

Ferno CPR Board tarjoaa tukevan alustan elvytykselle ja elvytyskoulutukselle. Pääkolo pitää potilaan pään oikeassa asennossa ja auttaa asettamaan potilaan oikein ja varmistamaan jatkuvan avoimen hengitystien. Muotoillut sivut helpottavat potilaan nostamista.

Käyttö

Elvytysalusta tulee liu'uttaa potilaan alle varmistuen, että potilaan pää on pyöristetyssä pääkolossa levyssä, jotta se pysyy oikeasuuntaisena elvytystä varten.

Puhdistus & Desinfiointi

Elvytysalusta on valmistettu harjatusta, erittäin kestävästä polyeteenistä. Puhdista pyyhkimällä puhdistus- ja desinfiointiliuksella.

Tekniset tiedot

Pituus:	60 cm
Leveys:	42 cm
Syvyys (paksuin kohta):	6.35 cm



Elvytysalusta käytössä

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämä käsikirja sisältää yleisiä ohjeita tämän tuotteen käytöstä, käytöstä ja hoidosta. Ohjeet eivät kata kaikkea. Tämän tuotteen turvallinen ja asianmukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän harkinnassa. Turvallisuustiedot sisältyvät palveluna käyttäjälle. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien turvallisuustoimenpiteiden tulee olla sovellettavien määräysten ja paikallisten protokollien mukaisia ja huomioituja. Tämän tuotteen oikeaa käyttöä koskeva koulutus on annettava ennen tämän tuotteen käyttöä todellisessa tilanteessa.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Sisällytä se tuotteen mukana, jos siirrät sen uusille käyttäjille. Lisäkopioita on saatavilla pyynnöstä asiakaspalvelun kautta.

OMISTUSILMOITUS

Tässä oppaassa esitetyt tiedot ovat Ferno Canadian, Mississauga, Ontario, Kanada, omaisuutta.


Ferno Canada pidättää kaikki immateriaalioikeudet, suunnittelu-oikeudet, valmistusoikeudet, kopiointikäyttö-oikeudet ja myyntikäyttö-oikeudet niihin ja kaikkiin niissä ilmoitettuihin artikkeleihin, paitsi siltä osin kuin nämä oikeudet on nimenomaisesti myönnetty muille tai jos niitä ei sovelleta myyjän omistamiin osiin.



LÄÄKETIETEELLINEN LAITE
GTN/UDI 00754016222078



Valmistettu Kiinassa Ferno Canadalle
2460 Tedlo Street, Mississauga Ontario
L5A 3V3, Kanada
+ 1-866-998-7866

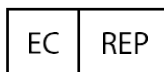

FERNO S.r.l.
via B. Zallone, n. 26, 40066
Pieve di Cento, Bologna, Italy
+39.051.6860028

1. Symbolisanasto

Tässä määritellyjä symboleja käytetään elvytysalustalla ja/ tai tässä oppaassa. Ferno käyttää kansainvälisen standardointijärjestön (ISO), American National Standards Instituten (ANSI) ja ensiapupalvelualan tunnustamia symboleja.



Viitenumero
(Tuotteen nimi)



Eränumero



Valmistuspäivämäärä

2.2



Lue käyttöopas



Valmistaja



Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä



Tuote täyttää Euroopan Unionin standardit



Kuormituskapasiteetti



Yleinen varoitus mahdollisesta loukkaantumisesta

ILMOITUS

Koulutus vaaditaan ennen tämän elvytysalustan käyttöä. Lue toimitetut ohjeet ennen käyttöä. Tarkista elvytysalusta kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä ja poista se käytöstä, jos siinä näkyy vaurion merkkejä.

2. Operaattorin taidot ja koulutus

2.1 Taidot

Elvytysalustaa käyttävät käyttäjät tarvitsevat:

1. Potilaan kiireellisen käsittelyn menetelmien työtuntemus.
2. Noudatta organisaatiosi määrittelemiä paikallisia protokollia ja ohjeita.

Koulutus

Harjoittelijat tarvitsevat:

1. Noudattaa koulutusvastaavansa suunnittelemaa tai hyväksymää koulutusohjelmaa.
2. Lukea tämä käyttöopas. Lisää ilmaisia käyttöoppaita saat Ferno Canadian asiakaspalvelusta.



VAROITUS

Kouluttamattomat käyttäjät voivat aiheuttaa vammoja tai loukkaantua. Vain koulutettu henkilöstö saa käyttää elvytysalustaa.

ASIAKASPALVELU

Asiakassuhteet ja tuotetuki ovat tärkeitä ominaisuuksia jokaisessa Ferno Canada -tuotteessa. Jos tarvitset apua paarien kanssa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai Ferno Canadian asiakaspalveluun alla lueteltujen ohjeiden mukaisesti:

FERNO KANADA

2460 Tedlo Street, Mississauga, ON, L5A 3V3, Kanada

Puhelin (Kanada) 1.800.543.3766

Verkkosivusto www.ferno.ca

EUROOPAN EDUSTAJA

Ferno Srl via B. Zallone, n.26, 40066 Pieve di Cento, Bologna, Italia

Puhelin (Eurooppa) 39.051.6860028