

S-2108 AF og S-2108 A.

FOLDEBÅRE

BRUGERMANUAL





Læs denne manual og opbevar til fremtidig reference

TIP: Regelmæssig rengøring hjælper med at reducere risikoen for overførsel af sygdom og gør det muligt for udstyret at fungere optimalt

Ansvarsfraskrivelse

Denne manual indeholder generelle instruktioner for brug, betjening og pleje af denne bære. Instruktionerne er ikke altomfattende. Sikker og korrekt brug af denne bære sker udelukkende efter brugerens skøn. Sikkerhedsoplysninger er inkluderet som en service til brugeren. Alle andre sikkerhedsforanstaltninger, der træffes af brugeren, skal være inden for og under overvejelse af gældende regler. Det anbefales, at der trænes i korrekt brug af denne bære, før den benyttes i en faktisk situation. Opbevar denne manual til fremtidig reference. Inkluder den med båren i tilfælde af overførsel til nye brugere. Yderligere gratis kopier er tilgængelige på anmodning hos FERNO Manufacturing.

Model S-2108-AF Produktspecifikationer

Længde - åben	206 cm
	229 cm
Længde - foldet	103 cm
	114 cm
Bredde – åben	55 cm
foldet	11 cm
Højde - åben	14 cm
foldet	20 cm
Enhedsvægt	6 Kg
Bæreevne	159 Kg

WARNING

Utrænede operatører kan forårsage personskade eller blive såret. Tillad kun uddannet personale at betjene båren.

Forkert brug af båren kan forårsage personskade. Brug kun båren til det formål, der er beskrevet i denne manual.

Forkert betjening kan medføre personskade. Betjen kun båren som beskrevet i denne vejledning.

En patient uden opsyn kan blive såret. Bliv hele tiden hos patienten.

En ikke fastspændt patient kan falde af båren og blive såret. Brug seleanordninger til at fastspænde patienten på båren.

En forkert sikret bære kan folde sig for transportøren og forårsage personskade. Fastgør båren sikkert, og kontroller, at slamlåsene er låst.

Hjælpere kan forårsage personskade. Oprethold kontrol over båren, betjen betjeningsknapperne og diriger alle hjælpere.

Hjælpere kan blive såret. Vis hjælpere, hvor de skal få fat i båren for at undgå klemme punkter.

Forkert vedligeholdelse kan medføre personskade. Vedligehold kun båren som beskrevet i denne manual.

Forkerte dele og service kan medføre personskade. Brug kun Ferno-dele og Ferno-godkendt service på båren.

Ændring af båren kan forårsage personskade og skade. Brug kun båren som designet af Ferno.

Fastgørelse af ukorrekte genstande på båren kan forårsage personskade. Brug kun Ferno-godkendte genstande på båren.

Model S-2108-A

Produktspecifikationer

Længde 206 cm

..... 229 cm

Bredde - åben 55 cm

foldet 11 cm

Højde 14 cm

Enhedsvægt 5 kg

Bæreevne 159 kg

Produktnummer	Produktnavn	GTIN / UDI
60-0102-005	S-2108-AF-206 FOLDEBÅRE	8588008129456
60-0102-006	S-2108-AF-229 FOLDEBÅRE, (PAKKET)	8588008129463
60-0102-007	S-2108-A-206 FOLDEBÅRE	8588008129470
60-0102-008	S-2108-A-229 FOLDEBÅRE, (PAKKET)	8588008129487

Foldebåre instruktioner

[Produktnavn] Medicinsk udstyr S-2108AF og S-2108 A foldebårer

[Anvendelsesformål]

Modellerne S-2108 AF og S-2108 A foldebårer er akutpatienthåndteringsenheder. Hver bære i serien er beregnet til professionel brug af mindst to uddannede operatører. Båren kan bæres af operatørerne.

I denne manual bruges det generiske udtryk "bære", når funktionen deles af alle modeller i serien. Den individuelle bæres navn bruges, når funktionerne er forskellige.

[Anvendelse]

Modellerne S-2108 AF og S-2108 A-bårer er de valgte akutbårer til: Militær, atletiktrænere, reddere, EMS, vildmarksredning, skipatroljer, udendørsaktiviteter, sikkerhedsingeniører, dyrlæger m.m.

[Brugsanvisning]

Fold båren / Udfoldning af bårerne - på modsat måde



[Rengøring og desinfektion]

Tør alle overflader af med desinfektionsmiddel. Følg desinfektionsmiddelproducentens instruktioner for påføringsmetode og kontakttid. Ferno anbefaler, at du inspicerer båren for skader, når du desinficerer den.

[Undersøg båren]

Få serviceudstyrspersonale til at inspicere båren regelmæssigt.

Hvis inspektion viser beskadigelse eller overdreven slitage, skal båren tages ud af drift, indtil reparation er udført.

[Dele og service]

Kontakt FERNO eller din Ferno-forhandler for at bestille Ferno-dele og for professionel reparation af bårer. Din distributør er den eneste agent autoriseret af Ferno til at administrere, servicere og reparere Ferno-produkter.

Ferno Slovakia kontakt:

Ferno Slovakia s.r.o.

Bošáca 893

913 07 Slovakia

Tlf: + 421 (0) 32 7708010

Fax: + 421 (0) 32 7708011

[Opbevaring]

Undgå høj temperatur og fugt

[Overensstemmelseserklæring]

Modellerne S-2108 AF og S-2108 A-bårer nævnt i denne manual er designet, fremstillet og testet til at opfylde specifikationerne i EN 1789 og EN 1865 standarder.



Brug under vejledning fra lægen eller sygeplejersken



Ferno Washingtom Italia S.r.l.
via B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento,
Bologna, Italien
+39.051.6860028